



Використовувати лише для вакцин від Дифтерії (DTP), Коклюша (DT), Правця(ТТ), Правець-Дифтерії (Td), Гепатиту В (НерВ), Поліомієліту(IPV), Папіломавірусу (HPV), Рідких Hib та комбінованих вакцин, MenAfrivas, Пневмо (PCV) (не для Prevenar), JE інактивованих

ВІДПРАВНИК

1. Підготуйте контейнер для транспортування.
2. Підніміть прозору плівку на передній частині індикатора, для отримати етикетки зі штрих-кодом (вона з клейом), та приклейте етикетку до транспортного документа.
3. Увімкніть **USRID-16WC**, натиснувши й утримуючи кнопку **START**  доки **REC**  не зміниться з блимання на постійне увімкнення (5 секунд), потім кнопку із затримкою запуску на 1 годину.
4. Заповніть наведену нижче картку кульковою ручкою.
5. Вставте цю картку з приєднаним активованим пристроєм у транспортний контейнер.
6. Запакуйте транспортний контейнер.

Приклейте пристрій сюди
цією стороною до гори

Назва відправника: _____

Дата: _____ Час: _____


Номер замовлення вакцини: _____

Вакцина: _____

ОДЕРЖУВАЧ: будь ласка, поверніть картку!




ОТРИМУВАЧ

1. Після прибуття негайно вийміть USRID-16WC із транспортного контейнера.
2. Натисніть і утримуйте кнопку STOP  доки **STOPPED** не зміниться з блимання на постійне (5 секунд), потім відпустіть кнопку. **USRID-16WC** зараз зупинено.
3. Дивіться на РК-дисплеї та дотримуйтесь інструкцій, як описано нижче.

Стан на дисплеї в нормі (ОК)

Пристрій зупинено.

Галочка  показує, що тривоги не зафіксовано.


Тривалість поїздки становила 26 днів та 18 годин.


Якщо "ОК", вакцини в нормі.



ВІДОБРАЖЕННЯ ТРИВОГИ


Пристрій зупинено.

Хрестик  що була зафіксована **ТРИВОГА**.

У цьому прикладі сигнал тривоги стався при температурі $\geq 30^{\circ}\text{C}$, позначено стрілкою .

Якщо USRID-16WC відображає сигнал

тривоги, будь ласка, дійте відповідно до таблиці рішень нижче:

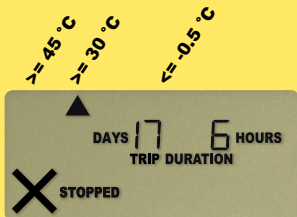

Температура тривоги	Що робити з вакцинами:
$\geq 45^{\circ}\text{C}$	Зверніться до закупівельного відділу
$\geq 30^{\circ}\text{C}$	Зверніться до закупівельного відділу
$\leq -0.5^{\circ}\text{C}$	Проведіть тест струшуванням. Використовуйте вакцину, якщо пройшло. Повідомте відділ закупівель про результат перевірки.